

Designet specielt til at bruge i den umiddelbare postoperative stomipleje<sup>1</sup> fordi posen tilbyder :

**1. Transparent forside**

- Nemt at se stomiens farve, tilstand og output
- Gør det nemt at sætte posen rigtigt på

**2. Stor opklipbarhed op til 60mm**

- Ideel til postoperative patienter, hvor stomistørrelsen ændrer sig
- Egnede til større stomier

**3. Ekstremt blød convex klæber**

- Egnede til brug i den post-operative fase\*, i de tilfælde hvor der er behov for en meget blød og fleksibel convexitet<sup>1</sup>
- Kan afhjælpe tidlige post-operative komplikationer hvor man vil opnå en sikker tætning hos patient med retraheret stomi<sup>1,2</sup>

**4. Meget hudvenlig hydrokolloid med den bedste klæbeevne i sin klasse\*\***

- Tilbyder en meget komfortabel og alligevel sikker tætning
- Tilpasser sig kroppens individuelle former og samtidig maksimal hudbeskyttelse



## FLERE FORDELE

- For at patienterne kan bevare kontinuiteten, når de forlader hospitalet kan de skifte til standard Pelican blød Convex opklipbar pose (839500 eller 839512). Det gør det nemt, at fortsætte med den pose man har vænnet sig til på hospitalet, blot med mere diskretion grundet det bløde stof forrest - og alligevel mulighed for, at bruge vinduet på forsiden stof, hvis man i starten har brug for det. Senere kan man vælge nøjagtig samme pose men med beige inderfolie - uden vindue - for endnu mere diskretion.
- Et effektivt vandtæt filtersystem giver kontrolleret luftafgang og forebygger lugt og minimerer risikoen for ballondannelse eller "pancaking" vacuum af posen. (Filterdække mærker medfølger)
- Integreret lukkesystem (udløb) giver maksimal sikkerhed og komfort - er nemt at tømme og rengøre.



Bøj bunden af udløbet som vist (som en smiley)



Tag fat i snippen og løft op - det giver en større åbning for tømning og rengøring



Efter tømning, rengør med en toiletpapir snip op i udløbet og fold op igen

- Bløde bælteører på posen for extra sikkerhed og tryghed.
- Anatomisk design for at tilpasse enhver kropsform.

*En klar tømbar pose bruges i den første postoperative fase for bedre observation ; herefter vælges et alternativ som tilpasser sig patientens individuelle behov.*

## BESTILLINGSNUMRE

Varenummer	Beskrivelse	Størrelse	Volumen	Pakkestr.
839500NF	Tømbar Pelican soft convex klare poser Opklipbare	12-40mm	400 ml	10
839512NF	Tømbar Pelican soft convex klare poser Opklipbare	15-60mm	520 ml	10

NF = no-fabric(klar forside)



Focuscare

Focuscare Denmark ApS.

Telefon: **+45 49 26 13 99**

Email: **info@focuscare.dk**

**www.focuscare.dk**

eakin®

1. Butler, Doris L. BA, RN, CWOCN, CCRN Early Postoperative Complications Following Ostomy Surgery: A Review Source J Wound, Ostomy and Continence Nursing, October 2009 Volume 36 Number 5, p 513 - 519  
2. Dykes, S., Ostomies and Stomal Therapies, ASCRS Annual Meeting, 2010 <https://www.fascrs.org/core-subject/ostomies-and-stomal-therapy-core-subject-2010>

\*\*All Gornex Pouches should only be recommended following a clinical assessment by a stoma care specialist to confirm patient suitability

\*\*Data on file