



eakin®

eakin®

eakin®

eakin®

eakin®

eakin®

eakin®

eakin®

eakin®

Cohesive
StomaWrap™

Vi har hudbeskyttelsen der omfavner din stomi

Sig *farvel* til lækager
og *goddag* til sund hud
omkring din stomi med den nye

Cohesive *StomaWrap*[™]

Cohesive *StomaWrap*[™] er fremstillet af de samme ingredienser som den uundværlige Eakin **Cohesive**[®] ring og **SLIMS**[®] som har beskyttet hud omkring stomier i flere årtier.

Den helt unikke facon på *StomaWrap*[™] betyder meget hurtig og nem tilpasning. Den behøver ikke opvarmes, modelleres eller strækkes i form til korrekt størrelse.



85 mm i diameter • 50 mm inderhul diameter • 3mm tykkelse


Cohesive *StomaWrap*[™] giver en komplet tætning omkring stomien for forebyggelse af lækage. Ved at forebygge lækage gør den din stomipose mere sikker, øger din tryghed, så du kan have ro i sindet.

StomaWrap[™] kan i mange tilfælde også øge bæretiden af din stomipose grundet den øgede sikkerhed.


Cohesive *StomaWrap*[™] er formet perfekt til de der har en stor eller oval stomi og grundet dens facon er den også meget velegnet til folk med nedsat fingerfærdigheder.

Hvordan virker Cohesive Stomawrap ?


Øm, irriteret hud tæt omkring stomien skyldes oftest at output fra stomien kommer i kontakt med huden. Mange stomiopererede tænker at rød og øm hud tæt omkring stomien er normalt og "noget der følger med" det at have en stomi. Men, det KAN forebygges :

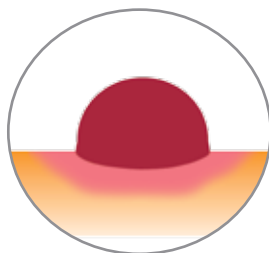

Huden tæt ved stomi
roden er rød og øm

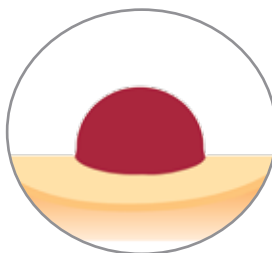

Cohesive *StomaWrap*[™]
forebygger lækage
og beskytter huden
omkring stomien

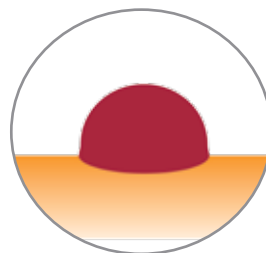

Hudproblemer kan und-
gås og kan opheles, når
StomaWrap[™] anvendes

Vejledning i brug

1




Sørg for at huden omkring stomien er ren og tør og fri for creme.

2



Fjern dækpapiret og stræk ringen let for at passe til din krops form omkring stomien. Det er uden betydning hvilken side der vender mod huden, idet ringen er hæftende på begge sider.

3

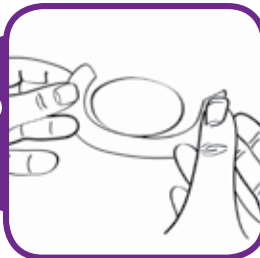

Læg ringen på huden og slå den rundt om stomien for at lægge den tæt op til og omkring stomien.

4



Lav en lille overlappning af enderne, så du opnår en helt tæt "omfavelse" af stomien så ikke noget hud er blottet tæt på stomien.

5



Tryk yderkanten af ringen lidt fladere. Varmen fra din hånd giver yderligere god tætning.

6



Stomipose, 1-dels brugere - Placer posen over ringen, hold den dér et kort øjeblik. 2-dels stomipose brugere: Placer stomipladen over ringen og sæt posen på som normalt.

For bedste resultat, tilpas tæt omkring din stomi som vist her



Gode råd om tilpasning:

- Sørg for at der ikke er blottet hud tæt omkring stomien
- Du kan nemt forme Cohesive *StomalWrap*[™] omkring stomien og få en perfekt tætning.
- Du kan røre så meget ved Cohesive *StomalWrap*[™] med hænderne som du har behov for - den mister ikke sin klæbeevne.



For flere tips:
Du kan se Tom her sætte en ring
omkring sin stomi... se videoen på
www.eakincohesiveseals.com

Hvilken ring skal jeg vælge til en given situation?



Stor Cohesive® ring

- ✓ Ideel til urostomier
- ✓ Når et stort område omkring stomien skal dækkes
- ✓ Kan afhjælpe hudirritation fra en stomiplade
- ✓ Kan anvendes sammen med dyb convexitet
- ✓ Nyttig til hudbeskyttelse omkring store sår.

98 mm diameter
19 mm inderhul
2.1 mm tykkelse

Små Cohesive® ringe

- ✓ Yder MAKSIMAL hudbeskyttelse
- ✓ for brugere med stort og tyndt output fra stomien
- ✓ til at løse lækage problemer
- ✓ kan forlænge bæretiden af stomiposen
- ✓ kan modelleres og formes som en blød convex ring.

48 mm diameter
19 mm inderhul
4.2 mm tykkelse

Cohesive SLIMS®

- ✓ til daglig forebyggelse af hudirritation og for øget sikkerhed
- ✓ egnet til de brugere der skifter stomipose ofte
- ✓ velegnet ved lettere hudirritation
- ✓ kan anvendes sammen med en forudstanset plade/pose for at dække en rest af hud der evt. måtte være ubeskyttet
- ✓ Ideel til brug sammen med convexe produkter.

48 mm diameter
19 mm inderhul
3.0 mm tykkelse

Cohesive StomaWrap™

- ✓ Ideel til store eller ovale stomier
- ✓ Ideel til brugere med nedsatte fingerfærdigheder
- ✓ Ideel til "indramning" af store sår for beskyttelse af sårkanterne
- ✓ til brug ved VAC-behandling af sår.

85 mm diameter
50 mm inderhul
3.0 mm tykkelse

eakin® Stomi tilbehør

Release™ klæberfjerner

Alkoholfri klæberfjerner for nem fjernelse af stomi-
pose uden smerter og ubehag. Tilsat E-vitamin for
bevarelse af hudens fugtbalance.



50 ml spray **REF 839023**

30 vådservietter **REF 839024**

Protect™ Barriere film


En holdbar barrierefilm beskytter huden mod
kropsvæsker, "stripping" af huden ved fjernelse af
klæbere. E-vitamin tilsat. Naturlig mynte duft.



50 ml spray **REF 839026**

30 våd servietter **REF 839025**

Stor Cohesive® ring

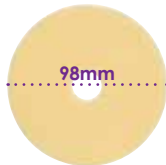


98mm

Store ringe dækker et større
hudområde, og beskytter
større områder f.ex. under
hele pladens klæber.

10 ringe **REF 839001**

Lille Cohesive® ring

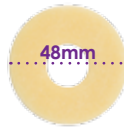


48mm

Ekstra tyk ring hjælper ved
massive lækageproblemer
og skadet hud.

30 ringe **REF 839002**

Cohesive SLIMS®

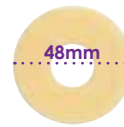

48mm

Tyndere ring til forebyggelse
af lækage, giver komfort og
sikkerhed til alle typer stomi.

30 ringe **REF 839005**

Cohesive StomaWrap™



85mm

Ovalt formet ring passer
til store eller ovale stomier
eller til brugere med nedsat
fingerfærdighed.

10 ringe **REF 839006**

Cohesive® Pasta



En unik alkoholfri pasta til brug
ved dybe folder, ujævnheder
og sprækker i huden, baseret
på samme formel som
Cohesive® ringe.

60 grams tube **REF 839010**

Perform™ Fortykkelses gel



Små opløselige poser til brug i posen,
som omdanner tynd stomioutput
til en gel. Øger sikkerhed mod
lækage, ballondannelse - især
om natten.

60 gelposer **REF 839020**

Cohesive StomaWrap™
Pakningstørrelse: 10 ringe

REF 839006

Vi har hudbeskyttelsen
der *omfavner* din stomi



Distributør i DK :
Focuscare Denmark ApS
www.focuscare.dk



eakin® 

www.eakincohesiveseals.com



Manufactured by: TG Eakin Limited, 15 Ballystockart Road, Comber, Northern Ireland www.eakin.com