

EAKIN COHESIVE® HUDPLADER

TIL LÆKAGE FOREBYGGELSE...

Eakin Cohesive® hudplader anvendes i stomi - og sårpleje til at danne en vandtæt barriere. De er skabt til at forhindre lækage mellem hud og sår/fistel pose eller stomipose.

... OG SOM HUDBESKYTTELSE

Eakin Cohesive® hudplader giver også den mest optimale beskyttelse af huden. Bevirker også at allerede øm og irriteret hud vil hele og give mindre svien. Desuden forlænger de bæretiden af sårposen eller stomiposen.

Hvorfor skal jeg bruge Eakin Cohesive hudplader?

- Eakin Cohesive® anvendes i lag for at udfylde hulninger og folder således at lækage forebygges. Til større sår anvendes strimler af Eakin Cohesive hudplader til at "indramme" såret, så total beskyttelse af sårkanter / området omkring såret opnås

Eakin Cohesive® hudplader kan anvendes

- sammen med sår/fistelposer eller andre poser til at forlænge bæretiden

Eakin Cohesive® hudplader kan absorbere og

- beskytte huden mod high-output ætsende sår /fistel sekret

Eakin Cohesive® kan modelleres fuldstændig

- så du kan strække, rulle og brække over og udfylde folder alt efter den givne situation


Eakin Cohesive® hudplader kan også

- anvendes med god effekt til sår, hvor der bruges VAC. Til at indramme såret, beskytte huden og fremme det negative tryk.




BRUGSANVISNING

1. Sørg for, at huden omkring såret eller stomien er ren, tør og fri for fedtet creme
2. Fjern dækpapiret på den ene side og klip strimler eller anden form af pladerne til netop det behov der er - til "indramning" af sår klippes strimler 2-3 på den lange led eller den korte led afhængig af såret størrelse. Du kan også forsigtigt strække , skubbe strimlerne i form
3. Fjern så det andet dækpapir og placér det på kroppen. Du kan forsigtigt strække eller modellere pladen på plads, så du sikrer en helt tæt kobling mellem hud og plade/pose
4. Med dine varme hænder trykke yderkanten af pladen flad og nærmest i niveau med huden
5. Til sidst sættes sårpose/stomipose direkte ovenpå Eakin Cohesive pladen. Hold hånden over i 30 sekunder....for at opnå optimal sammenkobling af plade og pose.

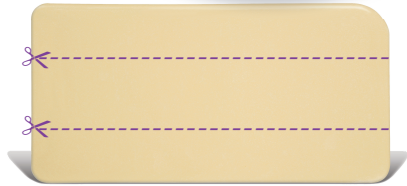

BESTILLINGS VARENUMRE

	Varenummer	Beskrivelse	Mål	Pakke størrelse
	839003	Store Cohesive® hudplader	10 x 20 cm	5
	839004	Små Cohesive® Skin Barriers	10 x 10 cm	5



Manufactured by:
TG Eakin Limited
15 Ballystockart Road, Comber
Northern Ireland, BT23 5QY

Focuscare



Focuscare Denmark ApS.
Østervangsvej 21
DK-8900 Randers
Telefon: +45 49 26 13 99
Fax: +45 49 21 02 57
Email: info@focuscare.dk
www.focuscare.dk