

# eakin cohesive<sup>®</sup> pasta

Alkohol -fri, ikke sviende<sup>1</sup>, klæbende  
pasta til brug i stomi, sår – og fistelpleje



A SMALL PART  
OF A BIGGER LIFE.

# Hudvenlig. Som tætning og effektiv forebyggelse af lækage

## Gode grunde til, at bruge eakin cohesive® pasta

Hudbeskyttelsen og hvordan hudens tilstand er, hører til de vigtige overvejelser der skal gøres når man skal bandagere stomier, fistler eller større sår med en klæbende bandage.

eakin cohesive® pasta hjælper med at **skabe en optimal overflade** for klæberen ved at **udfylde hudfolder**, ar eller fordybninger rundt om stomien, fistlen eller såret, så man sikrer at bandagen tilpasses mere sikkert.

- 1. Hudvenlig**, Ideel til, at udfylde folder m.m. og da den er alkohol-fri vil den ikke svie på selv meget følsom og hudløs hud.
- 2. Ideel til opbygning til hudniveau**, og forebygger lækage, ved at forme en effektiv barriere og et jævnt hudniveau omkring stomier, fistler og sår.
- 3. Ideel til udjævning i hudfolder, revner og ar**, langs sårets ujævne kanter eller som tætning og ophelende ved overfladiske separationer omkring en stomi.

**VIGTIGT:** eakin Cohesive® pasta må ikke bruges direkte ned i store åbne abdominalsår.

- ✓ Den tørrer ikke ud, så NUL spild.
- ✓ Den sparer tid, da man kan sætte den nye pose på umiddelbart efter.

## Brugt i stomplejen

### Løsning

eakin Cohesive® **pasta** blev her brugt som **UDFYLDNING** i den dybe fold ved navlen, hos en patient, hvis ileostomi var anlagt for tæt på midtlinjen.

En eakin Cohesive **SLIM**® ring blev placeret som daglig forebyggende omkring stomien.

Stomien blev bandageret som normalt.



## Brugt i sårplejen

### Løsning

Her blev eakin Cohesive® **pasta** sammen med eakin Cohesive® **skin barrier** (hudplader) brugt til, at beskytte og udjævne sårkanterne.

På den måde blev der en stabil overflade langs sårkanten, hvorpå eakin woundpouch kunne sættes på. Bæretiden blev forlænget ligesom lækage fra dette åbne abdominalsår med en enteroatmosfærisk fistel blev forebygget.

Den løsning betød et intakt posesystem i 24 timer for denne patient, som tidligere var behandlet uden succes med VAC terapi.



## Brugt i fistelpleje

### Løsning

eakin Cohesive® **pasta** blev her brugt til **UDFYLDNING** i folder og langs suturlinjer hos en patient med en high-output fistel opstået efter en perforeret divertikel.

Ovenpå og omkring fistlen blev lagt en **large eakin Cohesive**® **seal** som dækkede et større område og skabte en jævn overflade, hvor irriteret hud kunne ophele.

Fistlen blev bandageret med pose som normalt.



# Hvordan bruges pastaen

Klem pastaen ud af tuben og fordel på huden , tryk den på plads med en fugtig fingerspids.

Kan anvendes sammen med **eakin Cohesive®** Seals, stomiposer samt sår- og fistelposer for optimal sikkerhed og beskyttelse mod lækage.

# Sådan bestiller jeg

	1 tube/æske	Varenummer
eakin cohesive® pasta	60g	839010

# Kontakt os for gratis prøver



## Focuscare Denmark ApS

Østervangsvej 21  
DK-8900 Randers C.

**Tlf: 49 26 13 99**

**info@focuscare.dk**

www.focuscare.dk

Focuscare

