

eakin® støtte bælter

Behagelig mavestøtte til stomier og brok.



A SMALL PART
OF A BIGGER LIFE. •

Komplet og ensartet mave støtte

eakin® **støttebælter** er fremstillet af et unikt materiale, nemlig **isoflex**, som betyder flere fordele for brugeren. isoflex er specielt udviklet af stomisygeplejersker til stomiopererede for, at give **komplet** og **ensartet** mave støtte til parastomale brok, mens det stadig er så fleksibelt, at stomien kan fungere normalt.

isoflex vil følge kroppens bevægelser og vil derfor opleves **behageligt** at bære i længere tid ad gangen, hvis der er behov for det og stadig sikre, at stomien kan fungere normalt.

Materialet er letvægts og åndbart, så det yder god støtte og er behageligt at have på, selv i varmt og fugtigt klima..

PLUS

- ✓ Neutralt farvet bælte for diskretion
- ✓ Justerbar velcrolukning for nem tilpasning
- ✓ Fås i 8 forskellige størrelser - kan tilpasses alle kropsformer
- ✓ Vaskbart

Hvornår skal bæltet bruges



Ved aktiv livsstil

Giver mavestøtte i perioder med fysisk aktivitet, såsom gåture, havearbejde, løftesportsgrene, rengøring mm.



Til støtte ved brok

Bæltet er designet af stomisygeplejersker til brug for støtte ved stomier og brok.

Hvilken størrelse bælte

Valg af den rigtige størrelse

1. Læg dig fladt på et plant underlag, så brokken bliver mindre og falder ind til en position, hvor din mave er så flad som muligt.
2. Brug et målebånd og mål rundt om maven, på det sted hvor stomi og brok sidder.
3. Noter dig målet og find i tabellen den størrelse der passer dig.
4. Hvis der er tvivl om størrelsen, eller målet er lige midt imellem 2 størrelser, vælg da den mindste.
5. Vælg mellem et 20 cm eller 26 cm bredt bælte, alt efter din kropsform og brokkets størrelse.

Varenumre ved bestilling

20cm bredt bælte

Størrelse	Mål	Antal/æske	Varenummer
Small	75-90cm	1	839051
Medium	90-105cm	1	839052
Large	105-120cm	1	839053
Extra Large	120-135cm	1	839054

26cm bredt bælte

Størrelse	Mål	Antal/æske	Varenummer
Small	75-90cm	1	839061
Medium	90-105cm	1	839062
Large	105-120cm	1	839063
Extra Large	120-135cm	1	839064

Kontaktinformation

Focuscare Denmark ApS

Østervangsvej 21
DK-8900 Randers C.

Tlf: 49 26 13 99

info@focuscare.dk

www.focuscare.dk

Focuscare

