

eakin **surround**TM hud beskyttelse

Den ideelle hudbeskyttelse til brug omkring sonder og katetre.



eakin[®] 

A SMALL PART
OF A BIGGER LIFE.

Fordelene ved, at bruge eakin **surround**[™] hudbeskyttelses ring

eakin **surround**[™] giver komplet beskyttelse ved, at danne en vandtæt og bakteriel barriere mod huden.

Baseret på de samme principper som eakin **Cohesive**[®] ringe, danner de en unik 3- dobbelt aktiv barriere mod fugt, irriteranter og fækale enzymer.

- ✓ Reducerer hudirritation
- ✓ Giver komplet beskyttelse
- ✓ Øger komforten, mindsker kløe
- ✓ Absorberer lækage
- ✓ Hjælper helingsprocessen
- ✓ Nem at bruge

Hvornår bruges den

eakin **surround**TM hudbeskyttelse er meget alsidig og kan bruges effektivt i mange situationer, så som:

- PEG - sonder
- Dræn
- ACE stoppere
- Trachealkanyler
- Topkatetre
- Grisehalekatetre

Hvordan bruges den



Rens og tør den omgivende hud



Fjern dækpapiret



Placer surround hudbeskyttelsen på huden omkring og overlap de 2 ender så beskyttelsen er helt komplet



Tryk let på hudbeskyttelsen indtil den sidder sikkert på plads

Varenumre ved bestilling

	Diameter	Antal/æske	Varenumre
Stor eakin surround [™] hudbeskyttelse	98mm	10	839011
Lille eakin surround [™] hudbeskyttelse	58mm	20	839012

Kontakt os for gratis vareprøver



Focuscare Denmark ApS

Østervangsvej 21
DK-8900 Randers C.

Tlf: 49 26 13 99

info@focuscare.dk

www.focuscare.dk

Focuscare

